

Homecath® PVC-fri

HomeCath® Hydrofila och PVC-fria tappningskatetrar är mycket bekväma och säkra att använda.

Ren intermittert kateterisering med HomeCath® PVC-fria och hydrofila tappningskatetrar innebär:

- yta av både PVP och NaCl för ökad befuktning
- mycket låg friktion vid införing och avlägsnande
- en minskad risk för infektioner och njurskador
- förhindrande av besvärande urinläckage

Ytskiktet på HomeCath® katetern är en hydrofil beläggning av PVP (polyvinylpyrrolidon) och NaCl som binder vatten. PVP är en vattenabsorberande polymer som kan absorbera upp till 9 till 10 gånger sin egen vikt. Resultatet med PVP, NaCl och vatten är en mycket blöt och hal yta som har 90 – 95% lägre friktion än traditionella katetrar med gel. NaCl höjer osmolaliteten på katetern vilket minskar risken att uretra torkar ut.

Katetern har en icke-traumatisk, rundad spets med dräneringshål som ytterligare underlättar ett enkelt och säkert införande.

HomeCath® hydrofila tappningskatetrar förebygger irritation och andra komplikationer i urinröret.

HomeCath® PVC-fria och hydrofila tappningskatetrar är

LÄTTANVÄNDA

Förpackningen fylls med vatten. Klar att använda inom 30 sekunder. Självhäftande flik på förpackningen.

EFFEKTIVA

Levereras i steril förpackning. Hållbar i 3 år (obruten förpackning). Hydrofilt ytskikt av PVP och NaCl. PVC-fri.

FLERA ALTERNATIV

Finns för män, kvinnor och barn. Nu både 15 och 20 cm för kvinnor och barn. Nelaton- eller Tiemannspets.



Tekniska specifikationer

SAMTLIGA PRODUKTER ÄR FÖR ENGÅNGSBRUK.

Material:

Kateterkropp

TPE (termoplastisk elastomer)

Konnektor


Internationellt färgkodad TPE.

Ytbeläggning


NaCl och PVP (polyvinyl-pyrrolidon).

Styckförpackning

Papper och PVC-fri plast, etylenoxidsteriliserade.

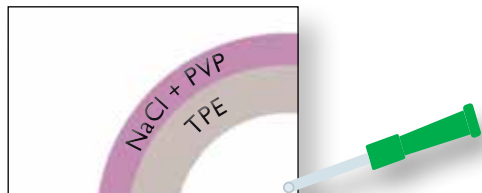

Tvärsnitt torr
HomeCath® kateter.

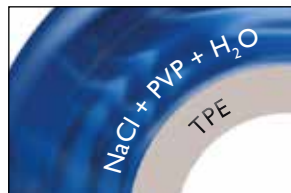

Tvärsnitt våt
HomeCath® kateter.



Beställningsinformation

HomeCath® UTAN VATTEN. Hydrofil tappningskateter, nelatonspets, 40st/fp		
Dolema art. nr.	Diameter	Längd (cm)
HCPPF 1508	Ch 8	15
HCPPF 1510	Ch 10	15
HCPPF 1512	Ch 12	15
HCPPF 1514	Ch 14	15
HCPPF 2008	Ch 8	20
HCPPF 2010	Ch 10	20
HCPPF 2012	Ch 12	20
HCPPF 2014	Ch 14	20
HCPPF 2016	Ch 16	20
HCPPF 2018	Ch 18	20
HCPPF 3008	Ch 8	30
HCPPF 3010	Ch 10	30
HCPPF 3012	Ch 12	30
HCMPF 4008	Ch 8	40
HCMPF 4010	Ch 10	40
HCMPF 4012	Ch 12	40
HCMPF 4014	Ch 14	40
HCMPF 4016	Ch 16	40
HCMPF 4018	Ch 18	40

HomeCath® UTAN VATTEN. Hydrofil tappningskateter, tiemannspets, 40st/fp		
Dolema art. nr.	Diameter	Längd (cm)
HCTPF4008	Ch 8	40
HCTPF 4010	Ch 10	40
HCTPF 4012	Ch 12	40
HCTPF 4014	Ch 14	40
HCTPF 4016	Ch 16	40
HCTPF 4018	Ch 18	40

HomeCath® Plus MED VATTENPÅSE. Hydrofil tappningskateter, nelatonspets, 30st/fp		
Dolema art. nr.	Diameter	Längd (cm)
HCPPF-SN 1508	Ch 8	15
HCPPF-SN 1510	Ch 10	15
HCPPF-SN 1512	Ch 12	15
HCPPF-SN 1514	Ch 14	15
HCPPF-SN 2008	Ch 8	20
HCPPF-SN 2010	Ch 10	20
HCPPF-SN 2012	Ch 12	20
HCPPF-SN 2014	Ch 14	20
HCPPF-SN 2016	Ch 16	20
HCPPF-SN 2018	Ch 18	20
HCPPF-SN 3008	Ch 8	30
HCPPF-SN 3010	Ch 10	30
HCPPF-SN 3012	Ch 12	30
HCMPF-SA 4008	Ch 8	40
HCMPF-SN 4010	Ch 10	40
HCMPF-SN 4012	Ch 12	40
HCMPF-SN 4014	Ch 14	40
HCMPF-SN 4016	Ch 16	40
HCMPF-SN 4018	Ch 18	40

HomeCath® Plus MED VATTENPÅSE. Hydrofil tappningskateter, tiemannspets, 30st/fp		
Dolema art. nr.	Diameter	Längd (cm)
HCTPF-SN 4008	Ch 08	40
HCTPF-SN 4010	Ch 10	40
HCTPF-SN 4012	Ch 12	40
HCTPF-SN 4014	Ch 14	40
HCTPF-SN 4016	Ch 16	40
HCTPF-SN 4018	Ch 18	40

HomeCath® och HomeCath® Plus är ett registrerat varumärke för tillverkaren Istem Medikal.