

HYACYST


Hyacyst® – enkel instillation med förfylld spruta och kateter

Hyacyst® är en steril vätska som består av natriumhyaluronat som finns naturligt i urinblåsans epitel.


Hyacyst® medger effektiv behandling av Interstitiell Cystit/Painfull Bladder Syndrome (IC/PBS) via kateterisering.

IC/PBS är en kronisk inflammation i urinblåsan som orsakar frekvent och akut urinering samt obehag/smärta i bäckenområdet. Den naturligt skyddande hinnan i urinblåsan (epitelet) skyddas mot skadliga ämnen i urinen med ett proteinlager som kallas för glykosaminoglykaner (GAG). Vid IC/PBS har detta skyddslager brutits ner, vilket gör att ämnena irriterar urinblåsans väggar. Urinblåsan blir sedan inflammerad och lagrar urinen bristfälligt.

Innan behandling med Hyacyst®

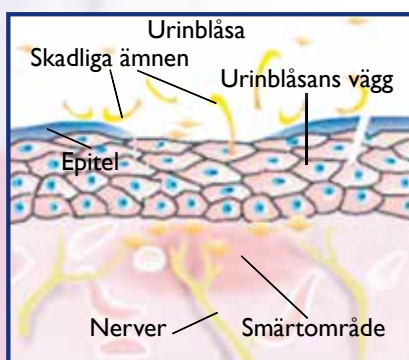

Efter behandling med Hyacyst®

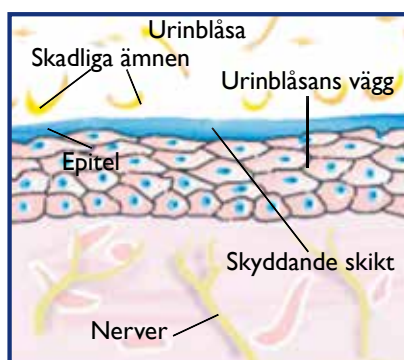

Till skillnad från inflammation i urinblåsan som orsakas av bakterier (cystit), vilket förknippas med urinvägsinfektioner (UVI) och behandlas med antibiotika, har man inte hittat några infekterande ämnen hos personer som lider av IC/PBS. Även om IC/PBS inte kan botas kan det behandlas och de flesta patienter upplever en lindring av symtomen med hjälp av behandling med Hyacyst® och livsstilsförändringar.

Hyacyst® instillationslösning ger:

- ny högre koncentration av natriumhyaluronat
- enkel instillation med förfylld spruta
- effektiv regenerering av epitelet
- påskyndad sårhäkning
- inga kända biverkningar
- goda behandlingsresultat

Referenser:

Ried et al. "Hyaluronan treatment of interstitial cystitis/painful bladder"
Int urogynecol J 001 10 2007 / 500192-007-0515-5



Tecken och symtom på IC/PBS

Interstitiell cystit (IC)/PBS visar sig på olika sätt hos olika patienter. Till exempel upplever vissa personer kronisk bäckensmärta, medan andra inte gör det. Symtomen kan intensifieras när urinblåsan fylls och sedan töms efter urinering.

Klassiska symtom kan vara följande:

- Frekvent urinering** - urineringstillfällena kan överskrida 60 gånger på 24 timmar.
- Smärta** - kronisk smärta i bäckenet, vulva, urinröret eller buksmärta vid urinering och sex.
- Akut urinering** - känslan av att behöva urinera akut, ofta åtföljt av smärta, tryck eller spasmer.

Terapi med Hyacyst®

Instillation med Hyacyst® är en poliklinisk behandling och utförs av kvalificerad vårdpersonal. Innan instillation av lösningen skall blåsan tömmas varpå Hyacyst®-lösningen instilleras i urinblåsan. Lösningen bör hållas kvar i blåsan minst 30 minuter eller längre. En instillation per vecka ges under de första 4 - 6 veckorna. Efter det görs behandlingen en gång per månad tills symtomen försvinner. Svarstiden varierar från patient till patient. Får patienten tillbaka symptomen återupptas samma behandling.

Produktinformation

Hyacyst® är en steril lösning med natriumhyaluronat utan farmakologisk effekt. Vid IC/PBS kan proteinlagret (GAG) brytas ner på grund av natriumhyaluronatbrist i vävnaden.

- Hyacyst®:
- regenererar epitelets permeabilitet
 - innesluter inflammatoriska områden
 - påskyndar sårhäkning

Hyacyst® ger signifikanta förbättringar

även för patienter med

- Återkommande bakterieinfektioner i urinblåsan.
- Strålningscystit.
- Hemmoragisk cystit.
- Kemoterapeutisk relaterad cystit.
- Profylaxstrålningsbesvär.

Beställningsinformation och förpackning

Art. nr.: HYC-I250 S. En förfylld spruta, 50 ml 120 mg natriumhyaluronat, med bipackad luer-lock kateter i sterila förpackningar.

Inga kända biverkningar

Inga biverkningar kan förväntas av behandlingen mer än ett möjligt obehag av att bli katetriserad.

