

Homecath[®] PVC-fri

HomeCath[®] Hydrofila och PVC-fria tappningskatetrar är mycket bekväma och säkra att använda.

Ren intermitterent kateterisering med HomeCath[®] PVC-fria och hydrofila tappningskatetrar innebär:

- yta av både PVP och NaCl för ökad befuktning
- mycket låg friktion vid införing och avlägsnande
- en minskad risk för infektioner och njurskador
- förhindrande av besvärande urinläckage

Ytskiktet på HomeCath[®] katetern är en hydrofil beläggning av PVP (polyvinylpyrrolidon) och NaCl som binder vatten. PVP är en vattenabsorberande polymer som kan absorbera upp till 9 till 10 gånger sin egen vikt. Resultatet med PVP, NaCl och vatten är en mycket blöt och hal yta som har 90 – 95% lägre friktion än traditionella katetrar med gel. NaCl höjer osmolaliteten på katetern vilket minskar risken att uretra torkar ut.

Katetern har en icke-traumatisk, rundad spets med dräneringshål som ytterligare underlättar ett enkelt och säkert införande.

HomeCath[®] hydrofila tappningskatetrar förebygger irritation och andra komplikationer i urinröret.

HomeCath[®] PVC-fria och hydrofila tappningskatetrar är

LÄTTANVÄNDA

Förpackningen fylls med vatten. Klar att använda inom 30 sekunder. Självhäftande flik på förpackningen.

EFFEKTIVA

Levereras i steril förpackning. Hållbar i 3 år (obruten förpackning). Hydrofilt ytskikt av PVP och NaCl. PVC-fri.

FLERA ALTERNATIV

Finns för män, kvinnor och barn. Nu både 15 och 20 cm för kvinnor och barn. Nelaton- eller Tiemannspets.



Tekniska specifikationer

SAMTLIGA PRODUKTER ÄR FÖR ENGÅNGSBRUK.

Material:

Kateterkropp

TPE (termoplastisk elastomer)

Konnektor


Internationellt färgkodad TPE.

Ytbeläggning


NaCl och PVP (polyvinyl-pyrrolidon).

Styckförpackning

Papper och PVC-fri plast, etylenoxidsteriliserade.

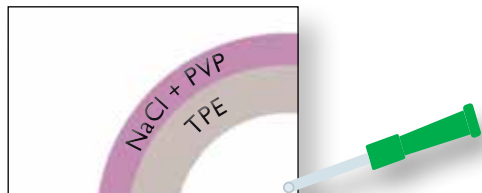

Tvärsnitt torr
HomeCath® kateter.

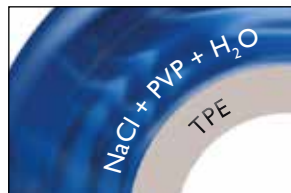

Tvärsnitt våt
HomeCath® kateter.



Beställningsinformation

HomeCath® UTAN VATTEN. Hydrofil
tappningskateter, nelatonspets, 40st/fp

art. nr.	Dolema	Diameter	Längd (cm)
HCPPF 1508	Ch 8	8	15
HCPPF 1510	Ch 10	10	15
HCPPF 1512	Ch 12	12	15
HCPPF 1514	Ch 14	14	15
HCPPF 2008	Ch 8	8	20
HCPPF 2010	Ch 10	10	20
HCPPF 2012	Ch 12	12	20
HCPPF 2014	Ch 14	14	20
HCPPF 2016	Ch 16	16	20
HCPPF 2018	Ch 18	18	20
HCPPF 3008	Ch 8	8	30
HCPPF 3010	Ch 10	10	30
HCPPF 3012	Ch 12	12	30
HCMPF 4008	Ch 8	8	40
HCMPF 4010	Ch 10	10	40
HCMPF 4012	Ch 12	12	40
HCMPF 4014	Ch 14	14	40
HCMPF 4016	Ch 16	16	40
HCMPF 4018	Ch 18	18	40

HomeCath® UTAN VATTEN. Hydrofil
tappningskateter, tiemannspets, 40st/fp

art. nr.	Dolema	Diameter	Längd (cm)
HCTPF4008	Ch 8	8	40
HCTPF 4010	Ch 10	10	40
HCTPF 4012	Ch 12	12	40
HCTPF 4014	Ch 14	14	40
HCTPF 4016	Ch 16	16	40
HCTPF 4018	Ch 18	18	40

HomeCath® Plus MED VATTENPÅSE. Hydrofil
tappningskateter, nelatonspets, 30st/fp

art. nr.	Dolema	Diameter	Längd (cm)
HCPPF-SN 1508	Ch 8	8	15
HCPPF-SN 1510	Ch 10	10	15
HCPPF-SN 1512	Ch 12	12	15
HCPPF-SN 1514	Ch 14	14	15
HCPPF-SN 2008	Ch 8	8	20
HCPPF-SN 2010	Ch 10	10	20
HCPPF-SN 2012	Ch 12	12	20
HCPPF-SN 2014	Ch 14	14	20
HCPPF-SN 2016	Ch 16	16	20
HCPPF-SN 2018	Ch 18	18	20
HCPPF-SN 3008	Ch 8	8	30
HCPPF-SN 3010	Ch 10	10	30
HCPPF-SN 3012	Ch 12	12	30
HCMPF-SA 4008	Ch 8	8	40
HCMPF-SN 4010	Ch 10	10	40
HCMPF-SN 4012	Ch 12	12	40
HCMPF-SN 4014	Ch 14	14	40
HCMPF-SN 4016	Ch 16	16	40
HCMPF-SN 4018	Ch 18	18	40

HomeCath® Plus MED VATTENPÅSE. Hydrofil
tappningskateter, tiemannspets, 30st/fp

art. nr.	Dolema	Diameter	Längd (cm)
HCTPF-SN 4008	Ch 08	8	40
HCTPF-SN 4010	Ch 10	10	40
HCTPF-SN 4012	Ch 12	12	40
HCTPF-SN 4014	Ch 14	14	40
HCTPF-SN 4016	Ch 16	16	40
HCTPF-SN 4018	Ch 18	18	40

HomeCath® och HomeCath® Plus är ett registrerat varumärke för tillverkaren Istem Medikal.