

Hydro Touch®



Klass:
Certifiering:

Class IIa
CE 1014
MED 070067

KARAKTERISTIKA

HydroTouch är en steril vattenlöslig gel som används vid införande av kateter, slang eller instrument i kroppsöppningar.

HydroTouch är ett klart, vattenlösligt, icke-irriterande, fettfritt glidmedel. Inte skadligt för gummi-, plast- eller glasytor.

INNEHÅLL:

Hydroxietylcellulosa
Propylenglykol
Vatten

INDIKATIONER

För smörjning av kateterytor, instrument och kroppsöppningar.

Gelen används

- vid suprapubiskt kateterisering av urinblåsan
- vid Ren Intermittent Kateterisering.
- vid införande av långtidskateter i urinröret
- för smörjning av endoskop och kirurgiska instrument innan insättningen
- i gynekologiska förfaranden för införande av douches, lavemang, rektal-termometrar och liknande produkter.
- formel för vaginal torrhet, säker att använda med kondom. Denna produkt är inte ett spermiedödande medel och kan inte användas som ett preventivmedel.

Fördelar:

- ingen risk för trauma i urinröret, nekros eller kateterinducerad uretrit.
- risken för urinvägsinfektion minskar eftersom urinrörets försvarsmekanism inte äventyras.
- ger större komfort, särskilt för patienter som är immobiliserade i rullstol.

SORTIMENT

Art. nr	Innehåll	Avdelningsförpackning
HYT-006	6 ml spruta	25 stycken
HYT-011	11 ml spruta	25 stycken

ANVISNING FÖR ANVÄNDNING

Öppna förpackningen genom att dra isär flikarna vid kolvstångens bakre del. Ta av den blå hatten aseptiskt genom att hålla kring hatten genom sterilförpackningen och dra samtidigt ut sprutan ur förpackningen. Gelen används.

Gelen kan användas upp till 24 timmar efter öppning men är då inte längre steril.

Överbliven gel kastas därefter.

VARNINGAR

Använd inte om förpackningen har skadats eller om bäst före datumet är passerat.

FÖRVARING

Förvara i rumstemperatur (15 – 30 °C). Förvaras på en ren och torr plats åtskilt från värme och ljus.

TILLVERKARE : ISTEM MEDIKAL Ivedik Org.San.Böl. 661.Sok..No.4 Ostim-Ankara/TURKIET