

HYALO4 CARE CREAM

HJÄLPER TILL ATT FRÄMJA FYSIOLOGISKA REPARATIONSPROCESSER



Produktbeskrivning

HYALO4 CARE CREAM är en topikal beredning med hyaluronsyra som huvudbeståndsdel. Hyaluronsyra är en biologisk polysackarid (glykosaminoglykan) som distribueras i den extracellulära matrisen i de flesta vävnader. Genom dess hydrofila egenskaper ger produkten ett hydratiserat utrymme kring och mellan celler, vilket underlättar cellernas migration.

Sammansättning

Huvudkomponent: Natriumsalt av hyaluronsyra med 0,2 %
Övriga komponenter: Polyetylen glykol 400 monostearat, decylester av oljesyra, emulgerande vax, glycerol, sorbitollösning 70 %, natriumdehydroacetat, metyl-p-hydroxibensoat, propyl-p-hydroxibensoat, doft, mjölksyra, renat vatten.

Indikationer

HYALO4 CARE CREAM är indicerad för behandling av hudirritationer och hudlesioner. Produkten är särskilt avsedd att täcka akuta sår (hudstransplant ställen och postoperativa snitt, första och andra gradens brännskador) och kroniska sår (kärlsår, metaboliska sår och trycksår).

Dosering och administrering

Såret ska rengöras och desinficeras före behandlingen. Applicera ett tunt lager kräm på sårytan, två eller tre gånger om dagen under högst 30 dagar i följd. Det behandlade området ska täckas med en steril kompress och ett sterilt förband.

Kontraindikationer

Bröderna Berner AB, Berner Medical

Postadress: Box 50132 202 11 Malmö | Besöksadress: Flintränegatan 21 211 24 Malmö
tfn 040-680 68 00 | info@bernermedical.se

Får inte användas på patienter med konstaterad överkänslighet mot någon av komponenterna i produkten.

Varningar och försiktighetsåtgärder

- Endast för utvärtes bruk.
- Får inte användas om förpackningen är skadad.
- Får inte användas efter det utgångsdatum som anges på förpackningen.
- Utgångsdatumet gäller då produkten förvaras i originalförpackningen vid högst 30 °C.
- Kassera 12 månader efter första öppnandet.
- Undvik att behållaren kommer i direkt kontakt med såret.
- För att minska risken för korsinfektion får varje tub med HYALO4 CARE CREAM kräm endast användas på en enda patient.
- Vid graviditet, amning och användning på barn ska du rådfråga din läkare innan du använder produkten eftersom säkerheten och effekten av HYALO4 CARE CREAM inte har fastställts för sådana fall.
- Kassera efter användningen enligt gällande nationella regler.
- Förvara oåtkomligt för barn.

Biverkningar

De följande lokala biverkningarna kan ibland förekomma: hudutslag på applikationsplatsen, klåda, brännande känsla, hudirritation, torrhet, erytem, dermatit, missfärgning av huden. En övergående effekt av metallsmak i munnen (dysgeusi) kan förekomma med mycket låg incidens och kan vara relaterad till patientens tidigare medicinska tillstånd. Symtomen är vanligtvis övergående och lindriga och de kräver sällan ett avbrytande av behandlingen i förtid.

Interaktioner

Använd inte samtidigt med desinfektionsmedel som innehåller kvartära ammoniumsalter eftersom hyaluronsyra kan fällas ut i närvaro av sådana salter. Samtidig lokal behandling av sår med antibiotika eller andra lokala medel har aldrig givit upphov till interaktioner eller inkompatibiliteter med HYALO4 CARE CREAM.

Förvaring

Förvaras vid högst 30 °C.

Artikelnummer och förpackningar

10001123 Tub med 100 g

Tillverkare

FIDIA Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica 3/A
35031 Abano Terme (Padua) Italien

Bröderna Berner AB, Berner Medical

Postadress: Box 50132 202 11 Malmö | Besöksadress: Flintränegatan 21 211 24 Malmö
tfn 040-680 68 00 | info@bernermedical.se