

# HYALO4 CARE PLUS

## EN SYNERGISTISK KOMBINATION FÖR ATT FRÄMJA SÅRLÄKNING OCH FÖRHINDRA INFEKTION



### Produktbeskrivning

HYALO4 CARE CREAM PLUS är en topikal beredning med natriumsalt av hyaluronsyra som huvudbeståndsdel. Hyaluronsyra är en biologisk polysackarid (glykosaminoglykan) som distribueras i den extracellulära matrisen i de flesta vävnader. Flera studier har dokumenterat att produkten kan delta i många och varierande vävnadsreparationsprocesser som underlättar läkning och återepitelisation. Genom dess hydrofila egenskaper tillhandahåller produkten den fuktiga sårmiljö som är nödvändig för den naturliga läkningsprocessen. Silversulfadiazin är ett välkänt antimikrobiellt medel som hämmar tillväxten in vitro av nästan alla patogena bakterier och svampar. Förekomsten av silversulfadiazin i produktens sammansättning är viktig för att förhindra mikrobiell kontaminering och förbättrar därmed hyaluronsyrans förmåga att underlätta sårläkningen. Dessa egenskaper gör att förbandet endast behöver bytas en gång om dagen: det orsakar minsta möjliga obehag för patienten och minsta möjliga exponering av lesionen för luften, vilket därmed minskar risken för sårkontaminering.

### Sammansättning

Huvudkomponent: Natriumsalt av hyaluronsyra, 0,2 %

Övriga komponenter: Silversulfadiazin 1 %, polyetylenglykol 400 monostearat, decylester av oljesyra, emulgerande vax, glycerol, sorbitollösning 70 %, renat vatten.

### Indikationer

HYALO4 CARE CREAM PLUS är indicerat för behandling av hudlesioner, särskilt de som löper hög risk för infektioner. Produkten är särskilt avsedd att täcka akuta och kroniska sår (brännskador av första och andra graden, vaskulära och metaboliska sår och trycksår) och tillhandahålla en fuktig och mikrobfri miljö för såret. HYALO4 CARE CREAM PLUS kan användas på icke infekterade sår för att förhindra infektion och för att förhindra återfall av infektion efter framgångsrik behandling av infekterade sår.

### Bröderna Berner AB, Berner Medical

Postadress: Box 50132 202 11 Malmö | Besöksadress: Flintränegatan 21 211 24 Malmö  
tfn 040-680 68 00 | [info@bernermedical.se](mailto:info@bernermedical.se)

## Dosering och administrering

Lesionerna ska rengöras före varje applicering. Applicera ett tunt lager kräm på sårytan, en eller två gånger om dagen beroende på svårighetsgraden, tills såret är helt läkt. Långvarig behandling (längre än en månad) ska övervakas av läkare för bedömning av lesionens kliniska utveckling. Det behandlade området ska täckas med ett sterilt förband.

## Kontraindikationer

- Får inte användas på patienter med konstaterad överkänslighet mot någon av komponenterna i produkten eller som lider av lever- eller njursvikt eller glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist.
- Får inte användas på gravida kvinnor eller spädbarn.

## Varningar och försiktighetsåtgärder

- Får inte användas om förpackningen är skadad.
- Får inte användas efter det utgångsdatum som anges på förpackningen.
- Utgångsdatumet gäller då produkten förvaras i originalförpackningen vid högst 30 °C.
- Kassera 12 månader efter första öppnandet.
- Kassera efter användningen enligt gällande nationella regler.
- Förvara oåtkomligt för barn.
- Undvik att behållaren kommer i direkt kontakt med såret.
- För att minska risken för korsinfektion får varje tub med HYALO4 CARE CREAM PLUS endast användas på en enda patient.
- Undvik att exponera behandlade områden för solljus eftersom produkter som innehåller silversulfadiazin kan färga huden brungrå. All färgning som uppstår kan däremot enkelt avlägsnas genom att tvätta området.

## Interaktioner

Använd inte samtidigt med desinfektionsmedel som innehåller kvartära ammoniumsalter eller proteolytiska enzymer eftersom de kan interagera med produkten.

## Biverkningar

HYALO4 CARE CREAM PLUS tolereras vanligtvis väl. När stora delar av kroppen behöver behandlas kan de biverkningar som ibland observeras efter systemisk användning av sulfonamider uppträda, som till exempel njursvikt, toxisk hepatit, agranulocytos, trombocytopeni, leukopeni.

## Förvaring

Förvaras vid högst 30 °C. Får inte frysas ned.

## Artikelnummer och förpackning

10001125 Tub med 100 g

## Tillverkare

FIDIA Farmaceutici S.p.A.  
Via Ponte della Fabbrica 3/A  
35031 Abano Terme (Padua) Italien

## Bröderna Berner AB, Berner Medical

Postadress: Box 50132 202 11 Malmö | Besöksadress: Flintränegatan 21 211 24 Malmö  
tfn 040-680 68 00 | [info@bernermedical.se](mailto:info@bernermedical.se)