

# HYALO4 SILVERSPRAY

EN LÄTTANVÄND SPRAY SOM FRÄMJAR SÅRLÄKNING OCH SKYDDAR MOT MIKROBIELL KONTAMINERING



## Produktbeskrivning

HYALO4 SILVERSPRAY är en suspensionsspray för utvärtes bruk som innehåller hyaluronsyra, metalliskt silver och vitamin E. Hyaluronsyran och silvret kombineras i en matris (kaolin och stärkelse) med absorberande egenskaper. Absorption av sårvätska skapar en miljö som underlättar den naturliga vävnadsregenereringsprocessen och bildar tillsammans med hyaluronsyra och silver en skyddande barriär mot mikrobiell penetration. Den filmbildande verkan som orsakas av vitamin E gynnar återställandet av den optimala hudfuktningen genom att underlätta återepitelisationsprocessen.

## Sammansättning

Huvudkomponent: 0,25 % natriumsalt av hyaluronsyra

Övriga beståndsdelar: metalliskt silver, kaolin, majsstärkelse, vitamin E, riskliolja, terpineol, disiloxan och drivmedel.

## Indikationer

Behandling av hudskador som inte är infekterade (t.ex. skrubbsår, skråmor, sår, små kirurgiska sår, brännskador av första och andra graden), diabetiska fotsår, fotsvamp och trycksår.

## Dosering och administrering

- 1) Tvätta lesionerna innan sprayen appliceras.
- 2) Skaka förpackningen väl under några sekunder före användning.
- 3) Håll behållaren i vertikalt läge och spraya en tillräcklig mängd pulver på ett avstånd av ca 15 cm för att täcka den yta som ska behandlas.

## Bröderna Berner AB, Berner Medical

Postadress: Box 50132 202 11 Malmö | Besöksadress: Flintränegatan 21 211 24 Malmö  
tfn 040-680 68 00 | [info@bernermedical.se](mailto:info@bernermedical.se)

- 4) Rekommendation är att den medicinerade delen övertäcks med steril gasväv.
- 5) Applicera en eller två gånger om dagen, beroende på det kliniska tillståndet.
- 6) Produkten är lätt att avlägsna genom tvättning av lesionen med koksaltlösning.

### **Kontraindikationer**

Känd överkänslighet mot någon av komponenterna. Inga överdoseringssymtom är kända. Inga interaktioner med något läkemedel är kända. Gravida kvinnor ska rådfråga läkare innan produkten används.

### **Varningar och försiktighetsåtgärder**

- Utvärtes bruk: får ej sväljas eller inandas.
- Undvik kontakt med ögonen. Om kontakt uppstår, skölj rikligt med vatten.
- Undvik att exponera det behandlade området för solljus.
- Undvik att sprayflaskan kommer i direkt kontakt med såret.
- Vid biverkningar ska behandlingen avbrytas och läkare kontaktas.
- Kontakta läkare vid långvarig användning.
- Stäng förpackningen efter användning.
- Om förpackningen är skadad eller om utgångsdatumet har passerat får produkten inte användas.

### **Fara**

- Extremt brandfarlig aerosol. Trycksatt behållare: kan brista om den upphettas.
- Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- Spruta inte på en öppen låga eller annan antändningskälla.
- Får inte penetreras eller brännas, inte ens efter användning.
- Skydda mot solljus.
- Utsätt inte produkten för temperaturer som överstiger 50 °C.
- Förvaras utom räckhåll för barn.

### **Förvaring**

Förvaras vid en temperatur mellan +5 °C och +30 °C. Partinummer och utgångsdatum anges på botten av behållaren. Utgångsdatumet avser oskadad produkt som förvarats på korrekt sätt. Innehåller inga ozonnedbrytande drivgaser. Efter användning ska produkten kasseras i enligt gällande nationella regler.

### **Artikelnummer och förpackning**

12000493 Spray med 125 ml

### **Tillverkare**

Nirial Pharma srl  
Via G. Rovani 7  
20123 Milano (Italien)

### **Distributör**

Fidia farmaceutici S.p.A.  
Via Ponte della Fabbrica, 3/A  
35031 Abano Terme (PD) Italien

### **Bröderna Berner AB, Berner Medical**

Postadress: Box 50132 202 11 Malmö | Besöksadress: Flintränegatan 21 211 24 Malmö  
tfn 040-680 68 00 | [info@bernermedical.se](mailto:info@bernermedical.se)