



# Kirurgiskt mun- och nässkydd typ IIR, elastiska öronband



Mycket välpassande och andningsbart typ IIR mun- och nässkydd tillverkat av PP-fiberduk. Mun- och nässkyddet består av tre lager, innehåller formbar näsklämma och fästs bakom med de elastiska öronbanden. Mun- och nässkyddet har hög filtreringskapacitet och uppfyller standardens SFS EN 14683:2019 krav på filtreringseffektivitet. Hypoallergeniskt mun- och nässkydd är glasfiber-, doft-, nickel-, och latexfritt.

## Avsedd användning

Medicin, skönhet, industri och andra branscher

## Bruksanvisning



Tvätta eller desinfektera händerna innan du tar på dig ett rent mun- och nässkydd. Ta på dig mun- och nässkyddet med hjälp av de elastiska öronbanden, som placeras bakom öronen. Skyddet skall täcka både näsa och mun. Rör inte skyddets yta förrän du har det på dig. Forma mun- och nässkyddet tätt vid näsryggen, så att näsan täcks och dra sedan skyddets nedre kant under hakan. Rör inte mun- och nässkyddet under användning. Tvätta händerna innan du tar av dig mun- och nässkyddet. Avlägsna skyddet genom att ta tag i de elastiska öronbanden. Rör inte skyddets yta. Tvätta eller desinfektera händerna efter att du tagit av dig mun- och nässkyddet och kasta det använda skyddet.

## Material

PP-fiberduk

## Färg

Ljusblå och vit

## Förvaringsinstruktioner

Förvaras torrt och skyddad från solljus. Förvaringstemperatur under 40°C. Luftfuktighet mindre än 80%.

## Säkerhet

Mun- och nässkyddet är engångsbruk och efter användning kasseras det med blandavfall.

## Tillverkningsland

Kina

## Importör

Berner Oy

## Distributör i Sverige

Bröderna Berner AB, Berner Medical

## Kirurgiskt mun- och nässkydd typ IIR, elastiska öronband ljusblå

Artikelnummer: 15841112  
Avdelningsförpackning: 50 st

## Kirurgiskt mun- och nässkydd typ IIR, elastiska öronband vit

Artikelnummer: 15842232  
Avdelningsförpackning: 50 st



20220127