


IQ-CATH TAPPNINGSKATETRAR

PRODUKTBROSCHYR

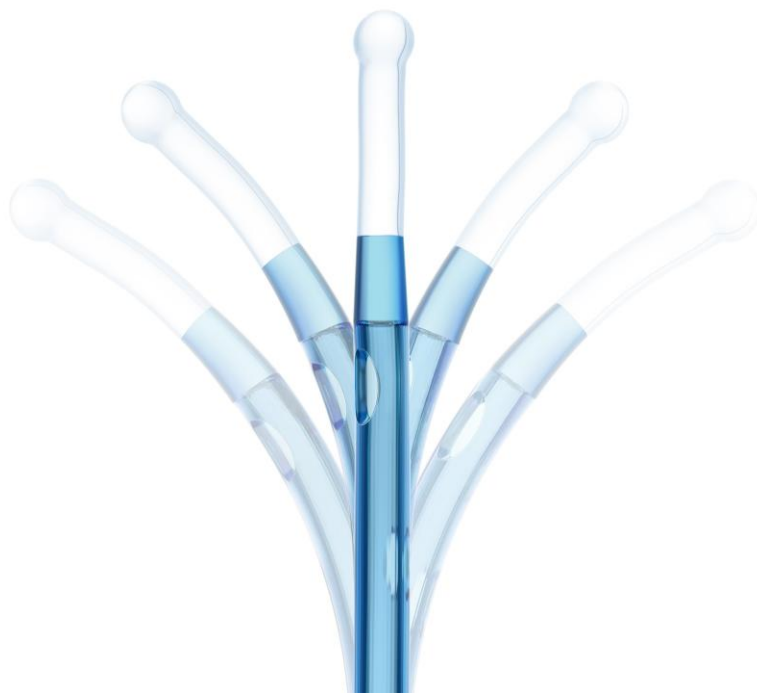

Tappningskatetrar för särskilt
skonsam kateterisering

BERNIER

MEDICAL

MANFRED SAUER IQ-CATH – KATETRAR MED KULFORMAD SPETS

IQ-Cath specialkateter med böjbar kulformad spets är utformad för personer som tappar sig själv (intermittent kateterisering). Katetern passerar särskilt bra genom urinrör med strikturer, fickor eller böjar, men även genom en spastisk slutmuskel (sfinkter) eller förstörd prostata.

Spetsen på IQ-Cath består av ett mjukt kulformat huvud placerat på en mycket böjbar "nacke". Denna kombination tillåter katetern att passera strikturer och utbuktningar i urinröret nästan obehindrat.

Kateterskaftets styvhet lämpar sig bra för självkateterisering. Tack vare sin konstruktion passerar katetern lätt genom urinröret och trycket mot urinrörsväggen är litet.


IQ-Cath-katetern har en universalkoppling som passar marknadens alla standard urinuppsamlingspåsar.

IQ-Cath finns tillgänglig i vätska (Klar-att-använda), med eller utan vätska, samt i en resemodell med integrerad vätskepåse och urinuppsamlingspåse.

IQ-Cath finns även med luer lock-fattning.


IQ CATH-KATETERNS EGENSKAPER:

- böjbar kulformad spets - säker och lätt att föra in
- ersätter Tiemann, passerar smidigt
- passerar bra även vid spastiskt urinrör

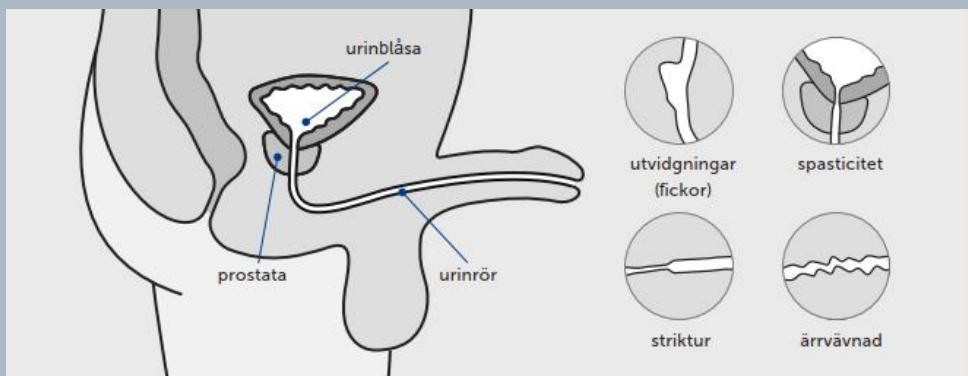

IQ2004.XX HYDROFIL KATETER UTAN VÄTSKA

IQ2004.10 Hydrofil kateter utan vätska. Aktiveras med 0,9 % koksaltlösning eller vatten.
 IQ2004.12 *Funktionell förpackning*, steril. Total längd 43 cm, effektiv längd 40 cm.
 IQ2004.14
 IQ2004.16

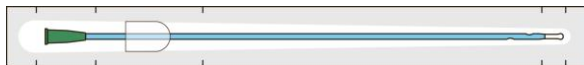

IQ2904.XX HYDROFIL KATETER UTAN VÄTSKA

IQ2904.10 Hydrofil kateter utan vätska. Aktiveras med 0,9 % koksaltlösning eller vatten.
 IQ2904.12 *Peel-open förpackning*, steril. Total längd 43 cm, effektiv längd 40 cm.
 IQ2904.14
 IQ2904.16
 IQ2904.18



IQ2104.XX HYDROFIL KATETER MED BIPACKAD VÄTSKEPÅSE

IQ2104.10 Hydrofil kateter med integrerad 0,9 % koksaltlösningsspåse.
 IQ2104.12 *Funktionell förpackning*, steril. Total längd 43 cm, effektiv längd 40 cm.
 IQ2104.14
 IQ2104.16
 IQ2104.18




IQ2304.XX HYDROFIL KATETER I VÄTSKA, KLAR-ATT-ANVÄNDA

IQ2304.10 Hydrofil kateter i vätska, 0,9 % koksaltlösning. Klar-att-använda direkt.
 IQ2304.12 *Peel-open förpackning*, steril. Total längd 43 cm, effektiv längd 40 cm.
 IQ2304.14
 IQ2304.16
 IQ2304.18



IQ4304.XX HYDROFIL KATETER I VÄTSKA, KLAR-ATT-ANVÄNDA, MED SLEEVE

IQ4304.10 Hydrofil kateter i vätska, 0,9 % koksaltlösning. Klar-att-använda direkt, med sleeve.
 IQ4304.12 *Peel-open förpackning*, steril. Total längd 43 cm, effektiv längd 40 cm.
 IQ4304.14
 IQ4304.16
 IQ4304.18

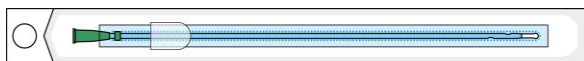

IQ6014.XX HYDROFIL LUER LOCK-KATETER UTAN VÄTSKA

IQ6014.12 Hydrofil kateter utan vätska, med luer lock-koppling.
 IQ6014.14 Aktiveras med 0,9 % koksaltlösning eller vatten.
Funktionell förpackning, steril. Total längd 43 cm, effektiv längd 40 cm.



De två sista siffrorna i produktnumret anger Charrière-storleken. Katetrarna är förpackade i lådor om 30 stycken.



Den unika böjbara kulformade spetsen styr katetern varsamt och säkert genom urinröret. IQ-Cath passerar också bra genom en spastisk slutmuskel (sfinkter).

Kateterns extra långa konnektor ger ett bättre grepp och enklare hantering.




IQ2902.XX HYDROFIL KATETER UTAN VÄTSKA

IQ2902.10 Hydrofil kateter utan vätska. Aktiveras med 0,9 % koksaltlösning eller vatten.
 IQ2902.12 *Peel-open förpackning*, steril. Total längd 17 cm, effektiv längd 12 cm.
 IQ2902.14





IQ2302.XX HYDROFIL KATETER I VÄTSKA, KLAR-ATT-ANVÄNDA

IQ2302.10 Hydrofil kateter i vätska, 0,9 % koksaltlösning. Klar-att-använda direkt.
 IQ2302.12 *Peel-open förpackning*, steril. Total längd 17 cm, effektiv längd 12 cm.
 IQ2302.14

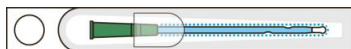


De två sista siffrorna i produktnumret anger Charrière-storleken. Katetrarna är förpackade i lådor om 30 stycken.

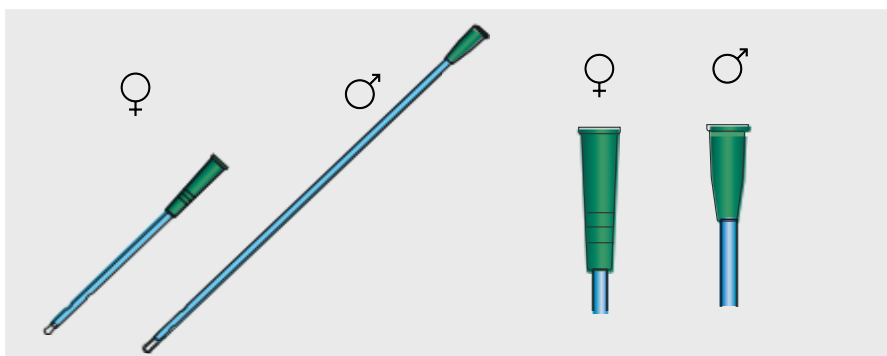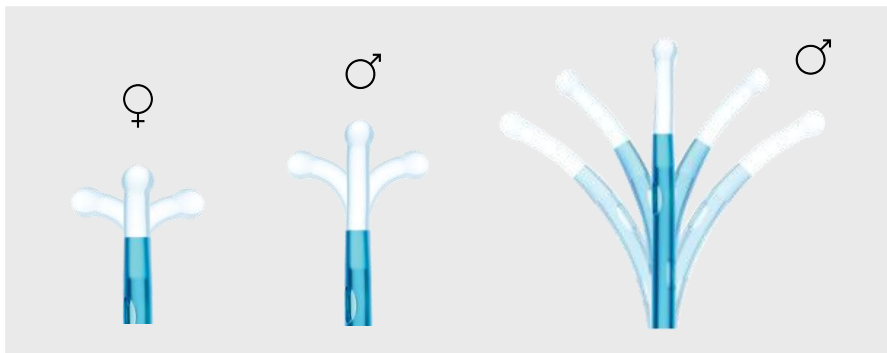

IQ2303.XX HYDROFIL KATETER I VÄTSKA, KLAR-ATT-ANVÄNDA

IQ2303.10
IQ2303.12
IQ2303.14


Hydrofil kateter i vätska, 0,9 % koksaltlösning. Klar-att-använda direkt.
Peel-open förpackning, steril. Total längd 33 cm, effektiv längd 30 cm.

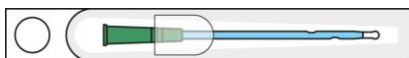

IQ4303.XX HYDROFIL KATETER I VÄTSKA, KLAR-ATT-ANVÄNDA, MED SLEEVE

IQ4303.10
IQ4303.12
IQ4303.14

Hydrofil kateter i vätska, 0,9 % koksaltlösning. Klar-att-använda direkt, med sleeve.
Peel-open förpackning, steril. Total längd 33 cm, effektiv längd 30 cm.

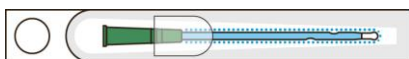


De två sista siffrorna i produktnumret anger Charrière-storleken. Katetrarna är förpackade i lådor om 30 stycken.

FÖRPACKNINGAR

FUNKTIONELL FÖRPACKNING - för mångsidig användning

Den funktionella förpackningen kan användas som en förlängning för att tömma urinen direkt i toaletten. För konnektorn mot spetsen för att tätas påsen.

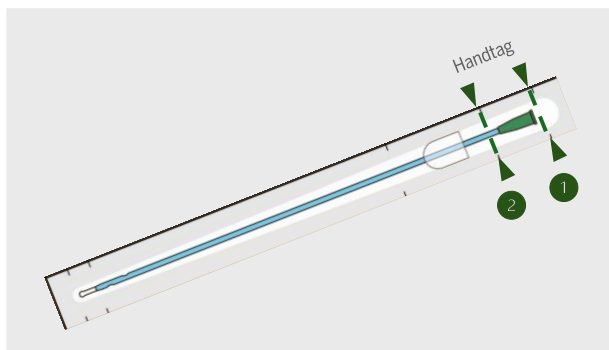

Perforeringar

- ▼ Riv av här
- ① Öppning
- ② Riv av med ett ryck vid markeringarna för att skapa ett handtag som kan användas vid införandet.


PEEL-OPEN FÖRPACKNING – för enkelheten

Peel-open förpackningen är lätt att öppna. Hål för fingrarna gör det enklare att öppna förpackningen utan att vidröra katetern.




IQ CATH

MED BÖJBAR OCH FLEXIBEL KULFORMAD SPETS
SÄKER OCH PÅLITLIG VID INTERMITTENT KATETERISERING

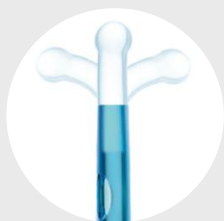


KULFORMAD SPETS

Den unika kulformade spetsen med böjbar "nacke" styr katetern varsamt och säkert genom urinröret.

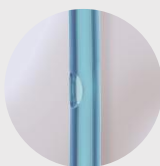

MJUKA ÖGON


Kateterns ögon är rundade för att förhindra skador på urinrörets känsliga slemhinna.

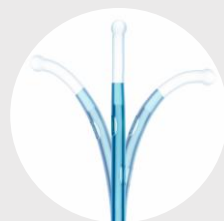

FLEXIBEL KATETER

Den kulformade spetsen och flexibla zonen, följt av det jämförelsevis styvare skaffet, gör IQ-Cath enkel att föra in och utövar litet tryck mot urinrörsväggen.

Tillverkad av Manfred Sauer
Medicinteknisk produkt Class I

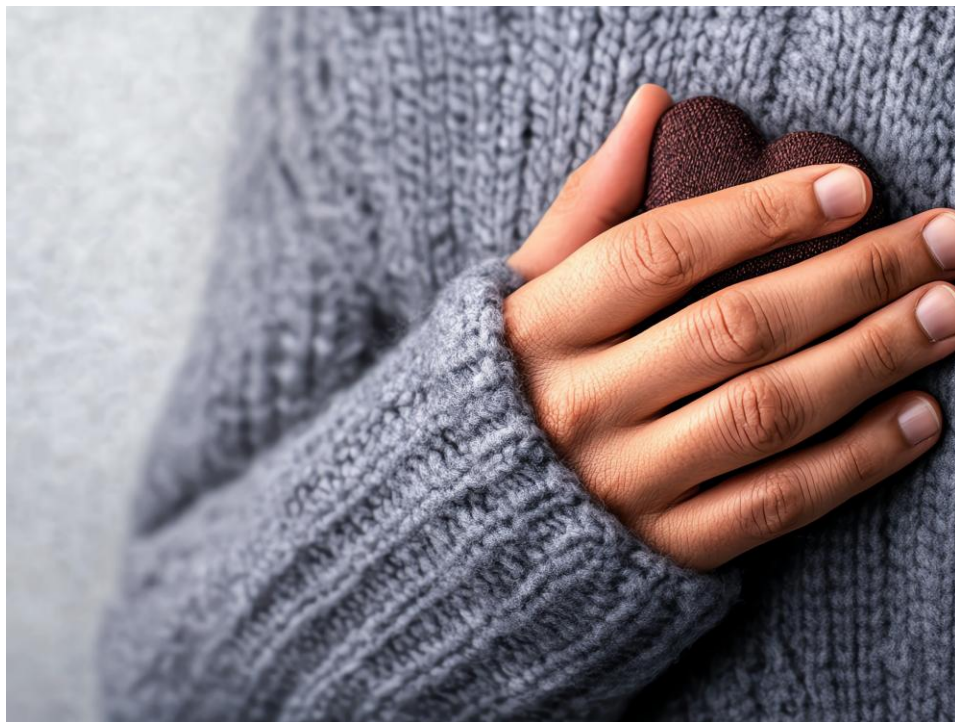

ÄR DET NÅGOT DU UNDRAR ÖVER? VI HJÄLPER DIG GÄRNA!

Norra Sverige

Bettina Rosenberg
073-383 39 38
bettina.rosenberg@bernercompany.com

Mellersta Sverige

Maria Solvik
073-640 48 53
maria.solvik@bernercompany.com

Södra/västra Sverige

Sara Sandrén
070-914 16 60
sara.sandren@bernercompany.com

Berner Medical är en pålitlig partner för vårdpersonal. Vi förbättrar livskvaliteten genom att erbjuda lösningar som stöder människors välbefinnande och funktionsförmåga. Vi betjänar offentlig och privat hälso- och sjukvård, omsorgssektorn och företag specialiserade på professionell rengöring. Våra styrkor är ett omfattande produktsortiment, leveranssäkerhet, produktutbildning och tvärvetenskaplig expertis.

Besök oss gärna på www.bernermedical.se

BERNER

MEDICAL