

RECACARE ANALTAMPONG

PRODUKTBROSCHYR



Mer frihet –
med tamponger för avföringsläckage

BERNIER

MEDICAL

RECAMEDS RECACARE – ANALTAMPONG FÖR AVFÖRINGSLÄCKAGE

BRA ATT VETA

Avföringsinkontinens är inte enbart en begränsning av patientens livskvalitet på grund av den fysiska dysfunktionen. Den mentala påfrestningen som uppstår till följd av känslan av isolering, vilken ofta följer med de specifika symtomen på detta tillstånd, minskar vitaliteten avsevärt. RECAcare analtampong hjälper vid avföringsläckage och ger många timmars trygghet, för de som drabbas av detta besvär.

RECAcare analtampong är det perfekta alternativet till traditionella hjälpmedel. Tampongen ersätter funktionen hos den inre sfinktern (slutmuskeln) och bidrar till en känsla av trygghet och frihet i alla situationer. Olika former och storlekar garanterar en optimal passform för kroppen.

RECAcare binder lukt och är inte synlig utifrån – du ser inget, du luktar inget!

ÖNSKAR DU PROVA PRODUKTEN?

För att hitta den optimala tampongstorleken har vi skapat ett provset som innehåller 7 olika tamponger och en införare. Om du har provsetet och redan har hittat rätt RECAcare-tampong kan du enkelt beställa just den artikeln.

RECACARE ANALTAMPONGEGENSKAPER

- Liten och praktisk
- Diskret
- Perfekt passform
- Säkerhet i upp till 20 timmar
- Tolereras väl
- 7 olika former och storlekar

MATERIAL OCH FÖRPACKNING

- Analtampong i PVA-skum
- Snöre av 100% polyester
- Förpackningsstorlek 10 eller 30 styck



INDIKATIONER

- Som stöd för träning av den analsfinktern
- Trycksår eller förebyggande av trycksår
- Stroke, MS, diabetes
- Meningomyelocele (spina bifida)
- Paraplegi
- Crohns sjukdom, ulcerös kolit
- Operations- eller strålningsskador
- Permanent svaghet i den anala sfinktern

ANVÄNDAREINSTRUKTIONER

- Tvätta händerna och ta bort skyddsplasten.
- Blötlägg RECAcare i varmt vatten i en minut och krama ur tampongen.
- Placera tampongen på införaren.
- Inta en bekväm och avslappnad ställning (ligg på rygg med böjda knän, sitt på toaletten eller stå med ena foten på en stol).
- För in tampongen rektalt och dra ut införaren när tampongen är på plats.
- Tampongen kan sitta kvar i rektum i upp till 20 timmar.
- INFÖRAREN: Rengör införaren efter användning med PH-neutral tvål och skölj noga med vatten.

RECACARE ANALTAMPONG FORM 1

- | | |
|------|---|
| 20.3 | Toppig analtampong. Diameter 25 mm, längd 52 mm |
| 20.4 | Toppig analtampong. Diameter 35 mm, längd 63 mm |

RECACARE ANALTAMPONG FORM 2


- | | |
|-------|---|
| 40.24 | Rundad jämbred analtampong. Diameter 23 mm, längd 48 mm |
| 40.30 | Rundad jämbred analtampong. Diameter 28 mm, längd 50 mm |
| 40.35 | Rundad jämbred analtampong. Diameter 33 mm, längd 55 mm |

RECACARE ANALTAMPONG FORM 3

- | | |
|-------|---|
| 44.24 | Rundad avsmalnande analtampong. Diameter 23 mm, längd 48 mm |
| 44.35 | Rundad avsmalnande analtampong. Diameter 33 mm, längd 56 mm |

RECACARE ANALTAMPONG INFÖRARE OCH PROVSET

- | | |
|------|--|
| 30.1 | Införare för flergångsanvändning. |
| 500 | Provset innehållande 7 tamponger (20.3, 20.4, 40.24, 40.30, 40.35, 44.24, 44.35) samt 1 införare |

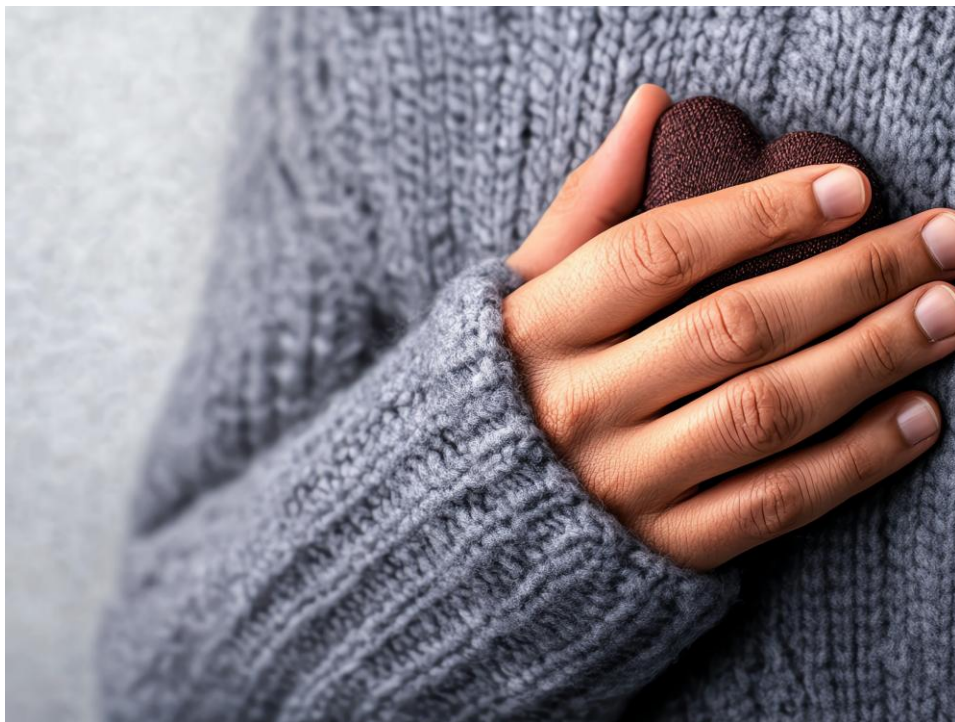

ÄR DET NÅGOT DU UNDRAR ÖVER? VI HJÄLPER DIG GÄRNA!

Norra Sverige

Bettina Rosenberg
073-383 39 38
bettina.rosenberg@bernercompany.com

Mellersta Sverige

Maria Solvik
073-640 48 53
maria.solvik@bernercompany.com

Södra/västra Sverige

Sara Sandrén
070-914 16 60
sara.sandren@bernercompany.com

Berner Medical är en pålitlig partner för vårdpersonal. Vi förbättrar livskvaliteten genom att erbjuda lösningar som stöder människors välbefinnande och funktionsförmåga. Vi betjänar offentlig och privat hälso- och sjukvård, omsorgssektorn och företag specialiserade på professionell rengöring. Våra styrkor är ett omfattande produktsortiment, leveranssäkerhet, produktutbildning och tvärvetenskaplig expertis.

Besök oss gärna på www.bernermedical.se