

RECAFEM VAGINALTAMPONG

PRODUKTBROSCHYR



Mer frihet –
med tamponger för urinläckage

BERNIER

MEDICAL

RECAMEDS RECAFEM – VAGINALTAMPONG FÖR URINLÄCKAGE

BRA ATT VETA

Besvär från blåsan gör livet svårt för kvinnor i alla åldrar som drabbas av ansträngningsinkontinens (läckage av urin vid nysning, skratt, hosta eller fysisk aktivitet). Dessa besvär försämrar livskvaliteten och påverkar det dagliga livet.

RECAfem är den ultimata hjälpen vid besvär från blåsan samt vid framfall. Orsaken till ansträngningsinkontinens är ofta en försvagad bäckenbottenmuskulatur. RECAfem, en vaginal tampong tillverkad av PVA-skum, korrigerar detta problem: Den stödjer blåshalsen genom att skapa ett lätt tryck mot slidans vägg. Samtidigt får de andra bäckenbottenmuskulerna ett lätt stöd och urinläckage kan undvikas.

Fem olika storlekar möjliggör en individuell anpassning. Du känner den inte, du ser den inte

ÖNSKAR DU PROVA PRODUKTEN?

Börja med att testa den minsta tampongstorleken. Vid fortsatt urinläckage, prova nästa storlek. Efter en kort tids utprovning har du hittat rätt storlek för dig.

RECAFEM VAGINALTAMPONGEGENSKAPER

- Liten och praktisk
- Diskret att bära
- Perfekt passform tack vare tvärgående räfflor
- Säkerhet i upp till 12 timmar
- Tolereras väl
- 5 storlekar, 2 längder

MATERIAL OCH FÖRPACKNING

- Vaginaltampong i PVA-skum
- Snöre av 100% polyester
- Förpackningsstorlek 10 stycken



INDIKATIONER

Vaginaltampong standard längd

- Ansträngningsinkontinens
- Blandinkontinens
- Försvagad bäckenbottenmuskulatur, ärrbildning & vaginala restsyndrom (ärr, atrofi, inflammation)
- Vaginalprolaps, neurologiska tillstånd (t ex. ryggmärgsskada, MS)
- Operationsförberedelser

Vaginaltampong kort längd

- Vid förkortad vagina efter Wertheim kirurgi
- Vid prolaps - tampongen kan placeras långt bak, pressas ut i mindre utsträckning
- Efter kolposuspension
- Ärrbildning och vaginal atrofi påverkas positivt efter vaginala ingrepp

ANVÄNDAREINSTRUKTIONER

- Tvätta händerna och ta bort skyddsplasten.
- Blötlägg RECAFem i varmt vatten i en minut och krama ur tampongen.
- Inta en bekväm och avslappnad ställning (ligg på rygg med böjda knän, sitt på toaletten eller stå med ena foten på en stol).
- För in tampongen djupt i slidan.

Med sin anatomiska form stödjer RECAFem blåshalsen och ger dig trygghet, frihet och livsglädje!

RECAFEM VAGINALTAMPONG STANDARD LÄNGD

66.1	Diameter 23 mm, längd 44 mm
66.2	Diameter 27 mm, längd 44 mm
66.3	Diameter 33 mm, längd 44 mm
66.4	Diameter 40 mm, längd 44 mm
66.5	Diameter 45 mm, längd 44 mm

PROVSET STANDARD LÄNGD

66.0A	66.1, 66.2, 66.3
66.0B	66.2, 66.3, 66.4
66.0C	66.3, 66.4, 66.5

RECAFEM VAGINALTAMPONG KORT LÄNGD

66.1V	Diameter 23 mm, längd 31 mm
66.2V	Diameter 27 mm, längd 31 mm
66.3V	Diameter 33 mm, längd 31 mm
66.4V	Diameter 40 mm, längd 31 mm
66.5V	Diameter 45 mm, längd 31 mm

PROVSET KORT LÄNGD

66.0AV	66.1V, 66.2V, 66.3V
66.0BV	66.2V, 66.3V, 66.4V
66.0CV	66.3V, 66.4V, 66.5V



ÄR DET NÅGOT DU UNDRAR ÖVER? VI HJÄLPER DIG GÄRNA!

Norra Sverige

Bettina Rosenberg
073-383 39 38
bettina.rosenberg@bernercompany.com

Mellersta Sverige

Maria Solvik
073-640 48 53
maria.solvik@bernercompany.com

Södra/västra Sverige

Sara Sandrén
070-914 16 60
sara.sandren@bernercompany.com

Berner Medical är en pålitlig partner för vårdpersonal. Vi förbättrar livskvaliteten genom att erbjuda lösningar som stöder människors välbefinnande och funktionsförmåga. Vi betjänar offentlig och privat hälso- och sjukvård, omsorgssektorn och företag specialiserade på professionell rengöring. Våra styrkor är ett omfattande produktsortiment, leveranssäkerhet, produktutbildning och tvärvetenskaplig expertis.

Besök oss gärna på www.bernermedical.se